





جهاز تحفيز الحبل **ETERNA™**
الشوكي

دليل الشحن السريع

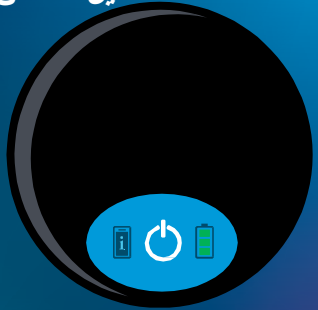

هذا الدليل السريع لا يشكل بديلاً عن قراءة دليل المستخدم لنظام الشحن
(موديل 16000) لجهاز Eterna™ SCS


إليك ما تحتاجه لكي تبدأ:

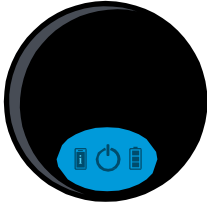

شاحن



محوّل كهربائي

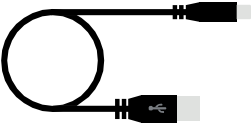


كابل شحن




لباس الشحن


① ضع محول الكهرباء داخل مدخل الكهرباء.

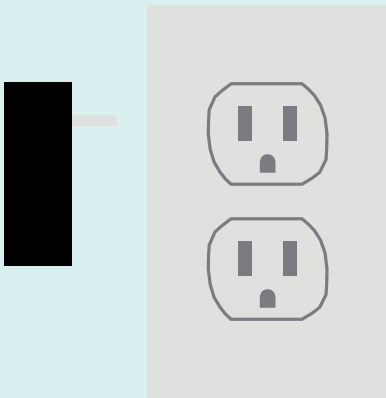


② ضع الشاحن على سطح ثابت مثل طاولة أو قم بوضعه على الأرض.

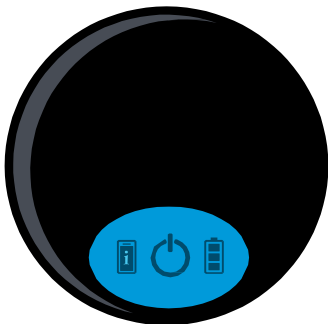


③ أوصل كابل الشحن والمحوّل الكهربائي.

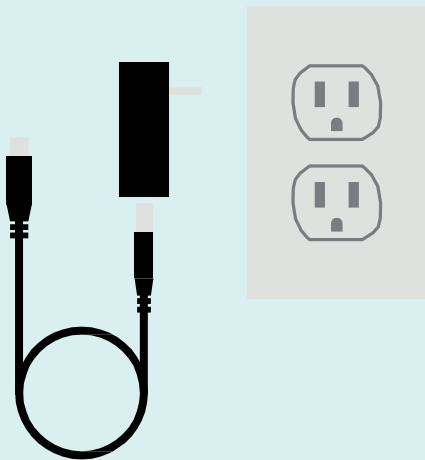

- ④ أوصل كابل الشحن بالشاحن وبمجرد أن يتم شحنه بالكامل فسوف تضيء جميع علامات البطارية لمدة 60 ثانية ومن ثم تنطفئ تلقائياً.

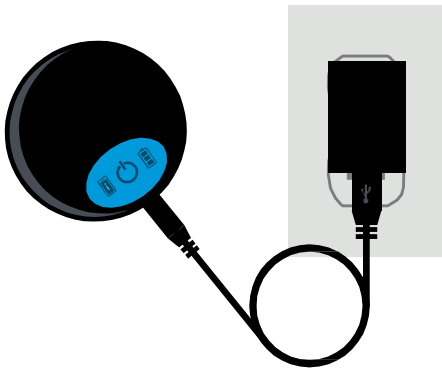


- 1 افصل الشاحن عن كابل الشحن. اضغط على علامة الكهرباء لإطفاء الشاحن. ستضيء جميع العلامات لوقت قصير وسيصدر الشاحن صفيراً إذا كان تشغيل الصوت مفتوحاً.

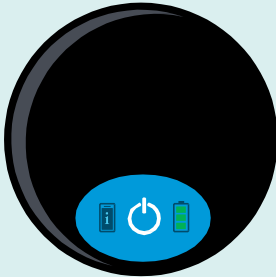

ملاحظة: لا يجوز استخدام الشاحن لشحن ناظم التحفيز العصبي أثناء قيامه بالشحن.


② أدخل الشاحن بالكامل في فتحة شبكة
لباس الشحن بحيث تكون العلامات
مقابل فتحة الجيب.

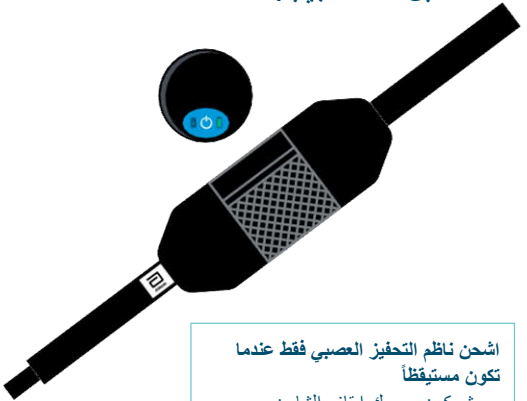


اشحن ناظم التحفيز العصبي فقط عندما
تكون مستيقظاً
بحيث يكون يوسعك إيقاف الشاحن
إذا أصبح الشحن مزعجاً.*

→ تتمة الخطوات على الجانب الخلفي


③ تأكد من تشابك حواف الجيب وتغطيتها للشاحن بالكامل , ثم اربط لباس الشحن حول خصرك بحيث يغطي الشاحن ناظم التحفيز العصبي.

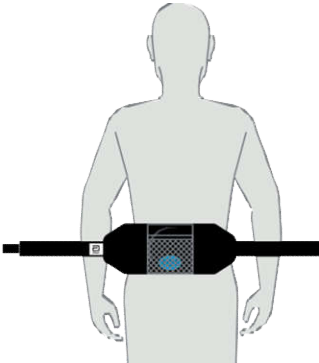

- ④ قم بملائمة شريط الفيلكرو اللاصق بحيث يكون اللباس ثابتاً حول الخاصرة والشاحن فوق ناظم التحفيز العصبي.

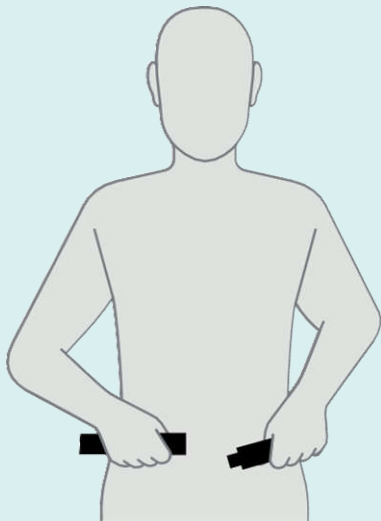

- 5 حين يدخل ناظم التحفيز العصبي إلى مرحلة الشحن فسوف يُصدر **صفيراً متواصلاً** إلى أن يبدأ الشحن.

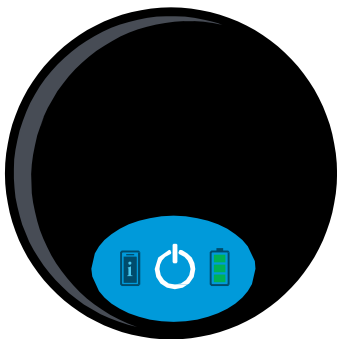

إذا لم يعثر الشاحن على ناظم التحفيز العصبي في غضون 90 ثانية، قسينطفي من تلقاء نفسه. إذا انطفأ الشاحن، اضغط على زر التشغيل من خلال جيب الشبكة لإعادة تشغيل الشاحن وإعادة ترتيبه فوق ناظم التحفيز العصبي.

⑥ للتحقق من حدوث الشحن، انتبه لأي من الأمور التالية:

• إذا كان إصدار الصوت مفتوحاً في إعدادات الشاحن، فسيصدر الشاحن صغيراً عندما يبدأ الشحن. بينما تتقدم عملية الشحن لن يصدر الشاحن صغيراً.

• مفتاح تشغيل الشاحن سيبدأ بالوميض ببطء.

• سيُظهر نظام تحكم المريض حالة الشحن ومستوى بطارية ناظم التحفيز العصبي.

إذا لم تلاحظ أي من تلك الأمور فإن الشحن لا يعمل.

7

حين يكون نظام التحفيز العصبي مشحوناً بالكامل، فسوف يصدر الشاحن 3 صفرات كل 10 ثواني (إذا تم تشغيل الثواني).

اطفيء الشاحن قبل خلع لباس الشحن.
يمكنك التأكيد بأن ناظم التحفيز العصبي مشحون بالكامل من خلال نظام تحكم المريض.



مؤشرات الشحن

العلامة	ضوء شحن
	<p>علامة التشغيل تضيء حين يتم تشغيل الشاحن.</p> <p>حين يقوم الشاحن بشحن نظام التحفيز العصبي، فستومض علامة التشغيل ببطء. حين يكون الشاحن في حالة الاقتران، فستومض علامة التشغيل بسرعة.</p>
	<p>علامة البطارية تضيء بشكل متقطع للإشارة إلى مستوى البطارية. بينما يتم شحن الشاحن، فستومض علامة البطارية.</p>

تحذير: قد تشعر بارتفاع الحرارة في موضع ناظم التحفيز العصبي أثناء قيامك بالشحن. تأكد من أن المنطقة حول الشاحن مهوية بشكل جيد وليست مغطاء بمادة عازلة مثل البطانية. إذا شعرت بانزعاج أثناء إعادة شحن ناظم التحفيز العصبي، فتوقف عن استخدام الشاحن وراجع صفحة "مشاكل وحلول" (صفحة 17 في دليل الشحن). إذا استمر الانزعاج فاتصل بالطبيب. اشحن ناظم التحفيز العصبي فقط عندم تكون مستيقظاً بحيث يكون بوسعك إيقاف الشحن إذا أصبح الشحن مزعجاً.

أصوات الشاحن

صوت الشاحن	الحدث
1 صفارة	تشغيل الشاحن
1 صفارة	الصوت يعمل
2 صفرات	إطفاء الشاحن
3 صفرات كل 5 ثواني	خطأ
3 صفرات كل 5 دقائق	مستوى البطارية منخفض
صفرات قصيرة ومتكررة	تم العثور على ناظم التحفيز العصبي
2 صفرات صوت منخفض ثم صوت عال	ابتداء شحن ناظم التحفيز العصبي
2 صفرات - صوت عال ثم صوت منخفض	توقف شحن ناظم التحفيز العصبي (غير منتظم)
3 صفرات - صوت منخفض، صوت عال ومن ثم صوت منخفض	اكتمل شحن ناظم التحفيز العصبي (مشحون بالكامل)

Abbott* دليل المستخدم لجهاز الشحن 2022. (ARTEN600076078 ver D).

Abbott

8701 Bee Caves Rd., Bldg. 2, Austin,
TX 78746 USA, Tel: 1 972 526 8286
Neuromodulation.Abbott

מדוגר מכשור רפואי בע"מ. טל: 09-7401457

מוגז: قبل استخدام معدات شركة Abbott، الرجاء مراجعة دليل الطبيب للاطلاع على قائمة التعليمات الكاملة، موانع الاستعمال، التحذيرات، التدابير الاحتياطية، الحالات العكسية وتوجيهات الاستعمال. الجهاز مخصص للاستخدام مع رقائق معدنية وتمديدات متصلة تتوافق مع الجهاز.



Abbott

© 2023 Abbott. جميع الحقوق محفوظة
النشرة للجمهور في EMEA. | تمت الموافقة على
23-82568 MAT-2310657 v1.0