




СИСТЕМА
СТИМУЛЯЦИИ
СПИННОГО МОЗГА
ETERNA™

**КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО
ПО ЗАРЯДКЕ**




Это краткое руководство не заменяет собой ознакомления с Руководством пользователя системы зарядки (модель 16000) для системы Eterna™ SCS.

Что вам понадобится:

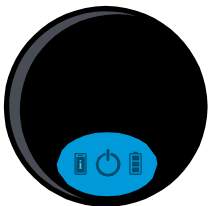

Зарядное устройство

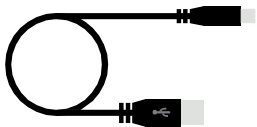

Зарядный
кабель




Адаптер питания




Пояс для зарядного
устройства

ЗАРЯДКА ВАШЕГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА


- 1 **Подключите адаптер питания к электрической розетке.**

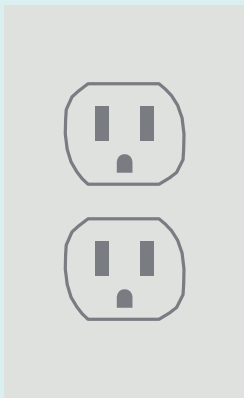

- ② Поместите зарядное устройство на устойчивую поверхность, например на стол или на пол.

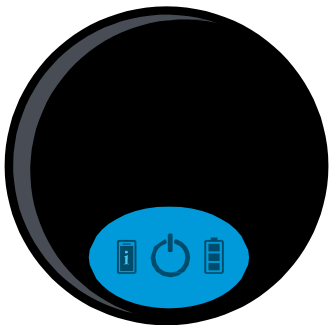


- ③ **Подключите** зарядный кабель к адаптеру питания.

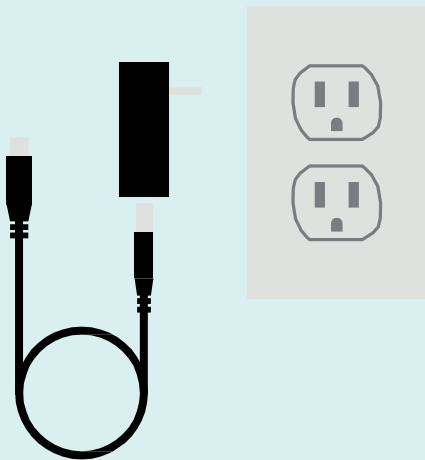


ЗАРЯДКА ВАШЕГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

- ④ Подключите зарядный кабель к зарядному устройству. После полной зарядки все сегменты значка батареи будут светиться в течение **60 секунд**, а затем погаснут.

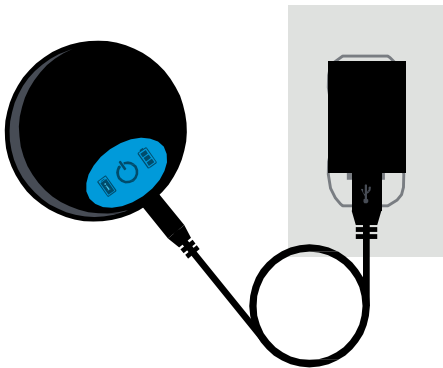

ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРА

- 1 Отключите зарядное устройство от зарядного кабеля. **Нажмите значок питания**, чтобы включить зарядное устройство. Все три значка кратковременно загорятся, и зарядное устройство издаст один звуковой сигнал (если звук включен).

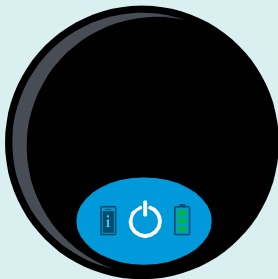

Примечание: Пока зарядное устройство заряжается, оно не может использоваться для зарядки электростимулятора.

- ② **Полностью вставьте зарядное устройство в сетчатый карман пояса так, чтобы значки были обращены к отверстию кармана.**




ЗАРЯЖАЙТЕ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР ТОЛЬКО КОГДА ВЫ НЕ СПИТЕ, чтобы при необходимости вы могли остановить зарядку, если она начнет доставлять дискомфорт.*

Дальнейшие этапы указаны →
на обратной стороне


ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРА

- 3** Убедитесь, что эластичные края кармана перекрывают друг друга и полностью закрывают зарядное устройство; затем оберните пояс для зарядного устройства вокруг талии так, чтобы зарядное устройство находилось над электростимулятором.

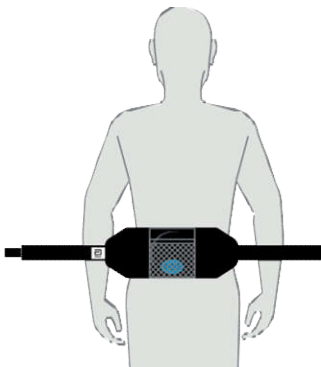


ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРА

- 4 Отрегулируйте ремень на липучке так, чтобы пояс был надежно закреплен на талии, а зарядное устройство находилось над электростимулятором.

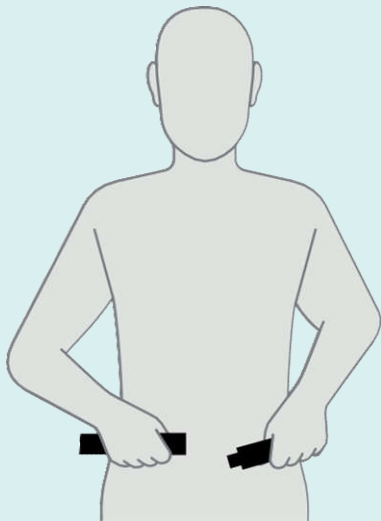

ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРА

- ⑤ Когда электростимулятор попадает в зону зарядки, он **издает непрерывные звуковые сигналы** до начала зарядки.

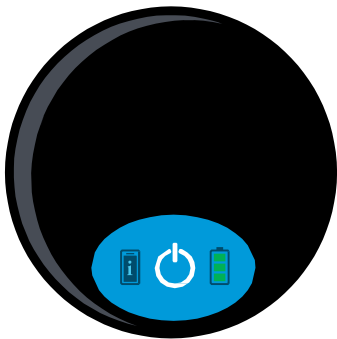

Если зарядное устройство не обнаружит электростимулятор в течение 90 секунд, оно автоматически выключится. Если зарядное устройство выключается, нажмите на значок питания через сетчатый карман, чтобы снова включить зарядное устройство, и отрегулируйте его положение над электростимулятором.

ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРА

⑥ Чтобы убедиться, что зарядка началась, обратите внимание на следующее:

- Если звук зарядного устройства включен в настройках зарядного устройства на контроллере пациента, **зарядное устройство издает звуковой сигнал** при начале зарядки. Во время зарядки зарядное устройство не будет издавать звуковых сигналов.
- Значок питания зарядного устройства **начинает медленно мигать**.
- Контроллер пациента отображает **статус зарядки** и уровень заряда **батареи** электростимулятора.

Если вы не заметили ни одного из этих признаков, **зарядка не происходит**.

ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРА

- ⑦ Когда электростимулятор **полностью заряжен, зарядное устройство издает три звуковых сигнала каждые 10 секунд** (если звук включен).

Выключите зарядное устройство перед тем, как снять пояс.

Вы можете убедиться, что электростимулятор полностью заряжен, проверив это на вашем контроллере.



Индикаторы зарядного устройства

ЗНАЧОК	СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР
	<p>Значок питания загорается, когда зарядное устройство включено.</p> <p>Когда зарядное устройство заряжает электростимулятор, значок питания мигает медленно. Когда зарядное устройство находится в режиме сопряжения, значок питания мигает быстро.</p>
	<p>Значок батареи загорается сегментами, чтобы показать уровень заряда батареи зарядного устройства.</p> <p>Пока зарядное устройство заряжается, один из сегментов значка батареи мигает.</p>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время зарядки вы можете ощущать повышение температуры в области установки электростимулятора.

Убедитесь, что зона вокруг зарядного устройства хорошо вентилируется и не покрыта изолирующими материалами, например, одеялом. Если вы чувствуете дискомфорт во время зарядки электростимулятора, прекратите использование зарядного устройства и обратитесь к разделу «Устранение неисправностей» (страница 17 в вашем руководстве по зарядке). Если дискомфорт не проходит, обратитесь к вашему врачу. Заряжайте электростимулятор только когда вы не спите, чтобы вы могли прекратить зарядку, если она начнет доставлять дискомфорт.

Звуковые сигналы зарядного устройства

СОБЫТИЕ	ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
Включение питания	1 звуковой сигнал
Включение звука	1 звуковой сигнал
Выключение питания	2 звуковых сигнала
Ошибка	3 звуковых сигнала каждые 5 секунд
Низкий уровень заряда батареи	3 звуковых сигнала каждые 5 минут
Обнаружен электростимулятор	Короткие повторяющиеся сигналы
Начало зарядки электростимулятора	2 звуковых сигнала (низкий тон, затем высокий тон)
Остановка зарядки (не выровнено)	2 звуковых сигнала (высокий тон, затем низкий тон)
Зарядка электростимулятора завершена (полностью заряжен)	3 звуковых сигнала (низкий тон, высокий тон, затем низкий тон)

*Abbott. *Руководство пользователя системы зарядки* (ARTEN600076078 ver D). 2022.

Abbott

8701 Bee Caves Rd., Bldg. 2, Austin, TX 78746, USA,
Tel: 1 972 526 8286
Neuromodulation.Abbott

מדורג מכשור רפואי בע"מ, טל': 09-7401457

Краткое резюме: Перед использованием устройств Abbott, пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством для врача, где приведен полный перечень показаний, противопоказаний, предупреждений, предосторожностей, возможных нежелательных явлений и инструкции по применению. Система предназначена для использования с электродами и соответствующими удлинителями, совместимыми с данной системой.

© 2023 Abbott. Все права защищены.
23-82568 MAT-2310657 v1.0 | Изделие
одобрено для использования в странах
региона EMEA.

